


ビレーズトリ®エアロスフィア®を使用される患者さんへ

# 週に1回アクチュエーターを洗浄しましょう


お薬が容器内にたまるときちんと噴霧できなくなるため、  
アクチュエーターをきれいに保つことが重要です。

噴霧孔

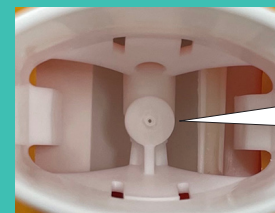

写真のように  
きれいな状態の  
アクチュエーターを  
維持しましょう

- 1 アクチュエーターから、缶を外した後、キャップを外します。  
外した缶は濡らさないようにします。
- 2 アクチュエーターの中を約30秒間、ぬるま湯で洗い流し、  
その後アクチュエーターをさかさまにして、さらに約30秒間洗い流します。  
アクチュエーターをよく振り、できる限り内部の水を取り除きます。
- 3 アクチュエーター内と吸入口を確認してください。  
もし、お薬が付着しているようなら、再度洗い流してください。
- 4 アクチュエーターを、キャップを外したまま、風通しがよい場所に置いて、  
しっかりと乾燥させます。濡れているうちは、缶をセットしないでください。
- 5 アクチュエーターが完全に乾いたら、  
キャップを閉じた後、ゆっくりと缶をアクチュエーターに差し込みます。

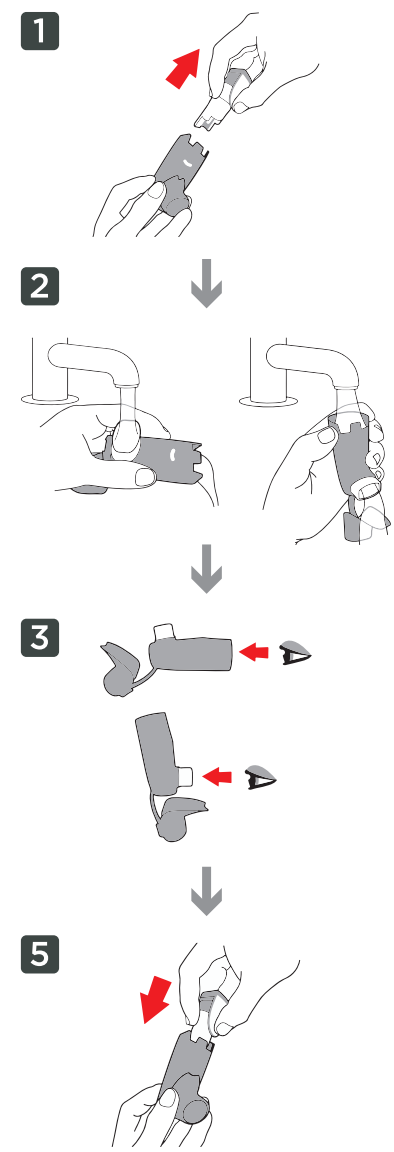

- 6 缶をアクチュエーターに戻した後は、  
A・B の操作を  
2度おこなってから  
使用してください。

**A** キャップを外し、よく振る

※キャップは、左右両端をつまみ、まっすぐ引き出して外します。

**B** ボタンを押して、1度空噴霧をする

※ボタンを押すとお薬が出ますので、顔から離し、眼に入らないように注意してください。